

Hipoclor

Desinfetante para lactários

- **Estabilizado**

Hipoclor é formado com agentes estabilizantes, o que garante a manutenção do teor de cloro ativo durante um longo período (mínimo 6 meses).

- **Amplo espectro antimicrobiano**

Hipoclor possui excelente ação contra bactérias e fungos.

- **Baixa toxicidade**

Hipoclor é formulado à base de hipoclorito de sódio, por isso é o desinfetante de escolha para áreas que requeiram baixa toxicidade como lactário e setor de nutrição.

- **Segurança na estocagem**

A embalagem do **Hipoclor** foi projetada para garantir a estabilidade do produto e segurança na sua estocagem e manuseio (tampa com dispositivo para alívio de gases).

Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor a levemente amarelada
Teor de cloro ativo	1,5% mínimo

Composição


Hipoclorito de Sódio, agentes estabilizantes e água.

Princípios Ativos

Hipoclorito de sódio – Teor de Cloro Ativo: mínimo 1,5%

Utilização

Hipoclor é um desinfetante à base de Hipoclorito de Sódio estabilizado, indicado para desinfecção de utensílios (frascos de mamadeiras, tampas, bicos, etc.) em lactários, maternidades e hospitais.

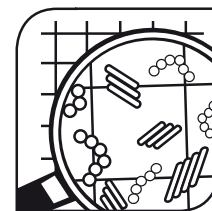

Hipoclor

Desinfetante para lactários

Modo de usar

Hipoclor deve ser preparado na concentração de 1% (10 mL de **Hipoclor** + água para 1 litro), equivalente a 150 ppm de cloro ativo. Imergir os utensílios previamente limpos na solução preparada e deixar por 60 minutos. Remover e enxaguar bem com água tratada.

Embalagem

Caixa contendo 2 bombonas de polietileno com 5 litros.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não misturar com água na embalagem original. O produto não deverá entrar em contato com metais não inoxidáveis, tecidos de lã, seda ou colorido.**

Precauções de uso

MANTENHA O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Use luvas de borracha, óculos de proteção e botas de segurança ao manipular produtos químicos. **VENENO:** Perigosa sua ingestão. **PERIGO:** Corrosivo. Causa queimaduras graves aos olhos. Impedir contato com olhos, pele e roupas. Lave as mãos após o uso.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou pele, lave-os imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local arejado e consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando o rótulo do produto. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Registro no MS: 3.2661.0194

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com